

## Bedienungsanleitung

**Mounjaro® 2,5 mg Injektionslösung in einem Fertigpen**  
**Mounjaro® 5 mg Injektionslösung in einem Fertigpen**  
**Mounjaro® 7,5 mg Injektionslösung in einem Fertigpen**  
**Mounjaro® 10 mg Injektionslösung in einem Fertigpen**  
**Mounjaro® 12,5 mg Injektionslösung in einem Fertigpen**  
**Mounjaro® 15 mg Injektionslösung in einem Fertigpen**  
Tirzepatid



**Wichtige Informationen, die Sie vor der Injektion von Mounjaro beachten müssen.**

**Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Gebrauchsinformation, bevor Sie Ihren Mounjaro Fertigpen verwenden und jedes Mal, wenn Sie einen neuen Fertigpen erhalten.** Es könnten neue Informationen vorliegen. Diese Informationen ersetzen nicht das Gespräch mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal über Ihren gesundheitlichen Zustand und Ihre Behandlung.


Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, wie Mounjaro richtig injiziert wird.

- Mounjaro ist ein Einzeldosis-Fertigpen.
- Der Fertigpen hat eine versteckte Nadel, die automatisch in die Haut eingeführt wird, wenn der Injektionsknopf gedrückt wird. Der Fertigpen zieht die Nadel zurück, wenn die Injektion abgeschlossen ist.
- Mounjaro wird einmal wöchentlich angewendet.
- Injizieren Sie nur unter die Haut (subkutan).
- Sie oder eine andere Person können in Ihren Bauch (Abdomen), Oberschenkel oder Oberarm injizieren.
- Möglicherweise benötigen Sie Hilfe von einer anderen Person, wenn Sie in Ihren Oberarm injizieren möchten.

### Lagerung und Handhabung

- Die Anweisungen zur Aufbewahrung finden Sie in Abschnitt 5 der Gebrauchsinformation.
- Der Fertigpen enthält Glasteile. Behandeln Sie ihn vorsichtig. Sollte der Fertigpen auf eine harte Oberfläche fallen, **verwenden Sie ihn nicht**. Benutzen Sie dann einen neuen Fertigpen für Ihre Injektion.

## Anleitung zu den Teilen

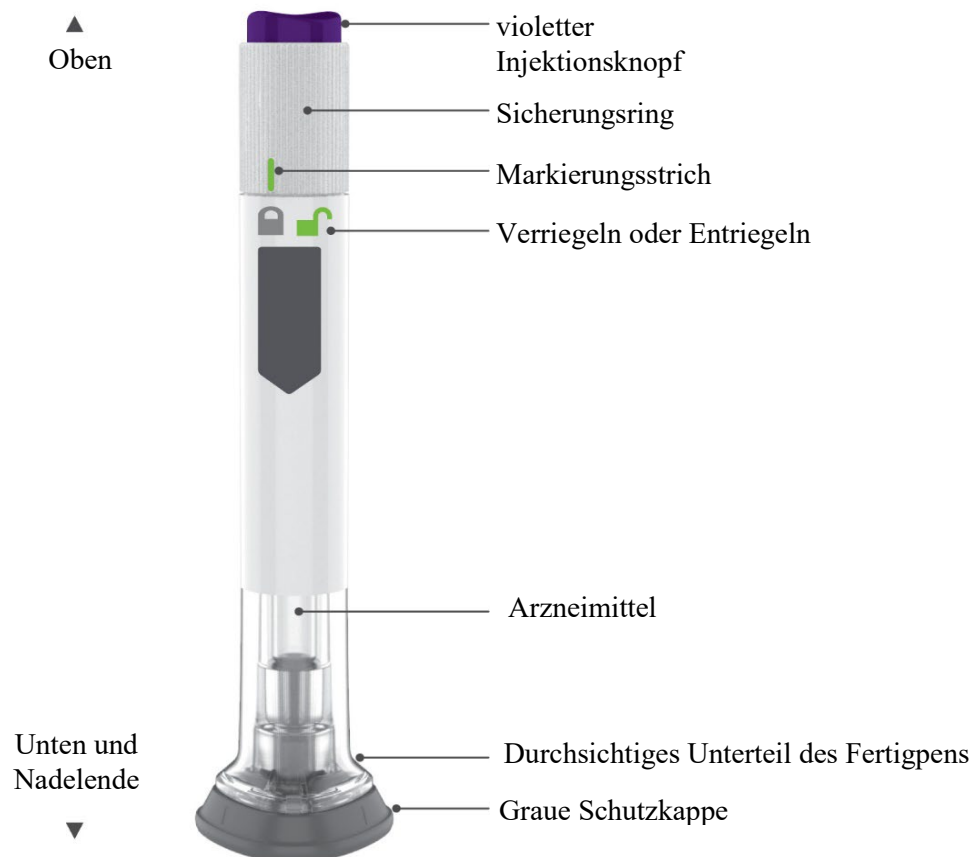


## Vorbereitung für die Injektion von Mounjaro

**Nehmen** Sie den Fertipen aus dem Kühlschrank.

Lassen Sie die graue Schutzkappe auf dem Fertipen, bis Sie für die Injektion bereit sind.

**Kontrollieren** Sie das Etikett des Fertipens, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Arzneimittel und die richtige Stärke haben und es nicht abgelaufen ist.

**Überprüfen** Sie den Fertipen, um sicherzustellen, dass dieser nicht beschädigt ist.

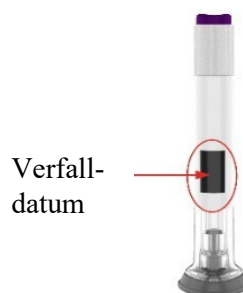


Stellen Sie sicher, dass das Arzneimittel

- nicht gefroren ist.
- nicht trüb ist.
- klar und nicht verfärbt ist.
- keine Partikel enthält.


**Waschen** Sie Ihre Hände.

## Wählen Sie Ihre Injektionsstelle

Ihr Arzt, Apotheker oder Ihr medizinisches Fachpersonal kann Ihnen helfen, die Injektionsstelle auszuwählen, die für Sie am besten geeignet ist.

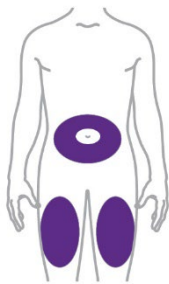

Sie oder eine andere Person können das Arzneimittel in Ihren Bauch (Abdomen) oder Oberschenkel injizieren.

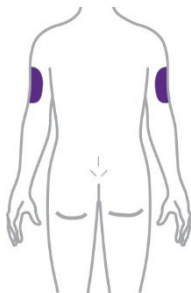


Eine andere Person kann die Injektion in die Rückseite Ihres Oberarmes durchführen.

Wechseln (rotieren) Sie Ihre Injektionsstelle jede Woche.

Sie können dieselbe Körperregion nutzen, aber stellen Sie sicher, dass Sie an dieser Körperregion eine andere Injektionsstelle auswählen.

### Schritt 1 Graue Schutzkappe abziehen

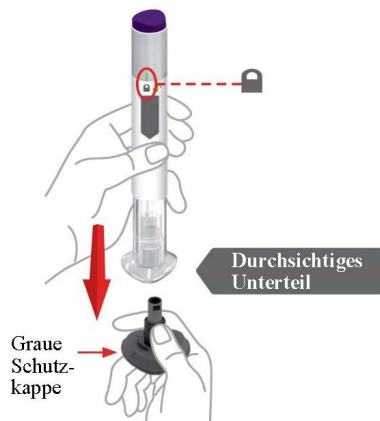

Stellen Sie sicher, dass der Fertipen **verriegelt** ist.

Entriegeln Sie den Fertipen **nicht**, bevor Sie das durchsichtige Unterteil des Fertipens auf die Haut gesetzt haben und bereit zum Injizieren sind.

**Ziehen** Sie die graue Schutzkappe gerade nach unten und entsorgen Sie diese.


**Setzen** Sie die graue Schutzkappe **nicht** wieder auf – das könnte die Nadel beschädigen.

**Berühren** Sie **nicht** die Nadel.

## Schritt 2 Aufsetzen des durchsichtigen Unterteils auf die Haut, dann entriegeln



**Setzen** Sie das durchsichtige Unterteil des Fertipens an der Injektionsstelle flach auf Ihre Haut.

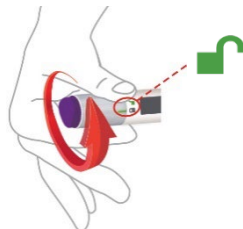

**Entriegeln** Sie den Fertipen durch Drehen des Sicherungsrings.

## Schritt 3 Drücken und halten für bis zu 10 Sekunden



**Drücken und halten** Sie den violetten Injektionsknopf.

**Achten** Sie auf:

- das erste Klicken = Beginn der Injektion
- das zweite Klicken = Ende der Injektion



Wenn der graue Kolben sichtbar ist, wissen Sie, dass Ihre Injektion vollständig abgeschlossen ist.

Entsorgen Sie den gebrauchten Fertipen nach Ihrer Injektion in einem durchstechsicheren Behältnis.

## Entsorgung Ihres gebrauchten Fertipens

- Entsorgen Sie den Fertipen in einem durchstechsicheren Behältnis oder wie von Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal empfohlen.
- Entsorgen Sie das gebrauchte durchstechsichere Behältnis.
- Fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal, wie Sie Arzneimittel entsorgen, die Sie nicht länger benötigen.



## Häufig gestellte Fragen

### Was mache ich, wenn ich Luftblasen in meinem Fertigpen entdecke?

Luftblasen sind normal.

### Was mache ich, wenn mein Fertigpen keine Raumtemperatur hat?

Es ist nicht notwendig den Fertigpen auf Raumtemperatur anzuwärmen.

### Was mache ich, wenn ich den Fertigpen entriegelt und den violetten Injektionsknopf gedrückt habe, bevor ich die Schutzkappe abgenommen habe?

Nehmen Sie die graue Schutzkappe **nicht** ab. Werfen Sie den Fertigpen weg und verwenden Sie einen neuen Fertigpen.

### Was mache ich, wenn sich ein Tropfen Flüssigkeit an der Nadelspitze befindet, nachdem ich die graue Schutzkappe entfernt habe?

Ein Tropfen Flüssigkeit an der Nadelspitze ist nicht ungewöhnlich. Berühren Sie **nicht** die Nadel.

### Muss ich den Injektionsknopf gedrückt halten, bis die Injektion vollständig beendet ist?

Das ist nicht notwendig, aber es kann Ihnen helfen, den Fertigpen ruhig und fest an Ihre Haut zu drücken.

### Ich habe es mehr als zweimal während meiner Injektion klicken gehört – zwei lautere Klicks und einen leiseren. Habe ich meine Injektion vollständig erhalten?

Einige Patienten hören ein leises Klicken direkt vor dem zweiten lauten Klick. Das entspricht der normalen Funktionsweise des Fertigpens. **Drücken** Sie den Fertigpen weiter auf die Haut, bis Sie das zweite laute Klicken hören.

### Ich bin nicht sicher, ob mein Fertigpen richtig funktioniert hat.



Überprüfen Sie, ob Sie Ihre Dosis erhalten haben. Ihre Dosis wurde korrekt abgegeben, wenn der graue Kolben zu sehen ist. Beachten Sie auch **Schritt 3** der Anleitung.

Wenn Sie den grauen Kolben nicht sehen können, kontaktieren Sie Lilly für weitere Hinweise. Bis dahin bewahren Sie Ihren Fertigpen an einem sicheren Ort auf, um versehentliche Verletzungen durch die Nadel zu vermeiden.

### Was mache ich, wenn sich ein Tropfen Flüssigkeit oder Blut auf meiner Haut nach der Injektion befindet?

Das ist nicht ungewöhnlich. Drücken Sie einen Wattebausch oder eine Kompresse auf die Injektionsstelle. Reiben Sie **nicht** an der Injektionsstelle.

### Weitere Informationen

- Wenn Sie schlecht sehen, **verwenden** Sie Ihren Fertigpen nicht ohne die Hilfe einer Person, die in der Anwendung des Mounjaro-Fertigpens geschult wurde.

### Wo kann ich mehr erfahren

- Wenn Sie weitere Fragen oder Probleme bezüglich Ihres Mounjaro-Fertigpens haben, sprechen Sie mit Lilly, Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal

**Zuletzt überarbeitet im September 2022.**