


## Bedienungsanleitung

### Trulicity® 0,75 mg Injektionslösung in einem Fertigpen Dulaglutid

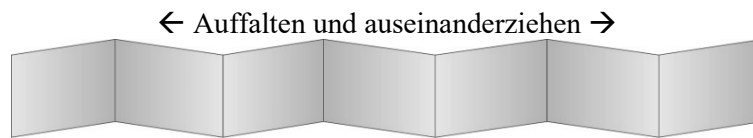

Lesen Sie die Anleitung auf beiden Seiten vollständig.

## ÜBER DEN TRULICITY FERTIGPEN

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Gebrauchsinformation für Patienten sorgfältig und vollständig, bevor Sie Ihren Fertigpen verwenden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, wie Trulicity richtig injiziert wird.

- Der Pen ist ein vorgefülltes Einweg-Injektionsgerät, das gebrauchsfertig ist. Jeder Pen enthält die wöchentliche Trulicity-Dosis (0,75 mg). Jeder Pen enthält nur eine Dosis.
- **Trulicity wird einmal wöchentlich angewendet.** Markieren Sie sich zur Erinnerung in Ihrem Kalender, wann Sie die nächste Dosis injizieren müssen.
- Wenn Sie den grünen Injektionsknopf drücken, wird der Pen automatisch die Nadel **in Ihre Haut** einführen, das Arzneimittel injizieren und die Nadel wieder herausziehen, **nachdem die Injektion abgeschlossen ist.**

## BEVOR SIE ANFANGEN

### Entnehmen

Sie den Pen aus dem Kühlschrank.

Lassen Sie die Schutzkappe auf dem Fertigpen, bis Sie für die Injektion bereit sind.

### Kontrollieren

Sie das Etikett, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Arzneimittel haben und es nicht verfallen ist.

### Überprüfen


Sie den Pen. Verwenden Sie ihn nicht, wenn Sie feststellen, dass der Pen beschädigt ist oder die Lösung trüb oder verfärbt ist oder Partikel enthält.

### Vorbereiten


Waschen Sie Ihre Hände.

## WÄHLEN SIE IHRE INJEKTIONSSTELLE

- Ihr Arzt, Apotheker oder Ihr medizinisches Fachpersonal kann Ihnen helfen, die Injektionsstelle auszuwählen, die für Sie am besten geeignet ist.
- Sie können Ihr Arzneimittel in Ihren Bauch (Abdomen) oder Oberschenkel injizieren.
- Eine andere Person kann die Injektion in Ihren Oberarm spritzen.
- Wechseln Sie Ihre Injektionsstelle jede Woche. Sie können dieselbe Körperregion nutzen, aber stellen Sie sicher, dass Sie an dieser Körperregion eine andere Injektionsstelle auswählen.

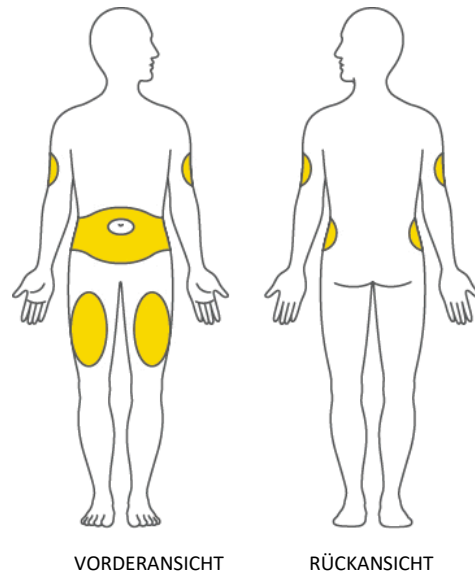

1. **KAPPE ABZIEHEN**
2. **AUFSETZEN UND ENTRIEGELN**
3. **DRÜCKEN UND HALTEN**

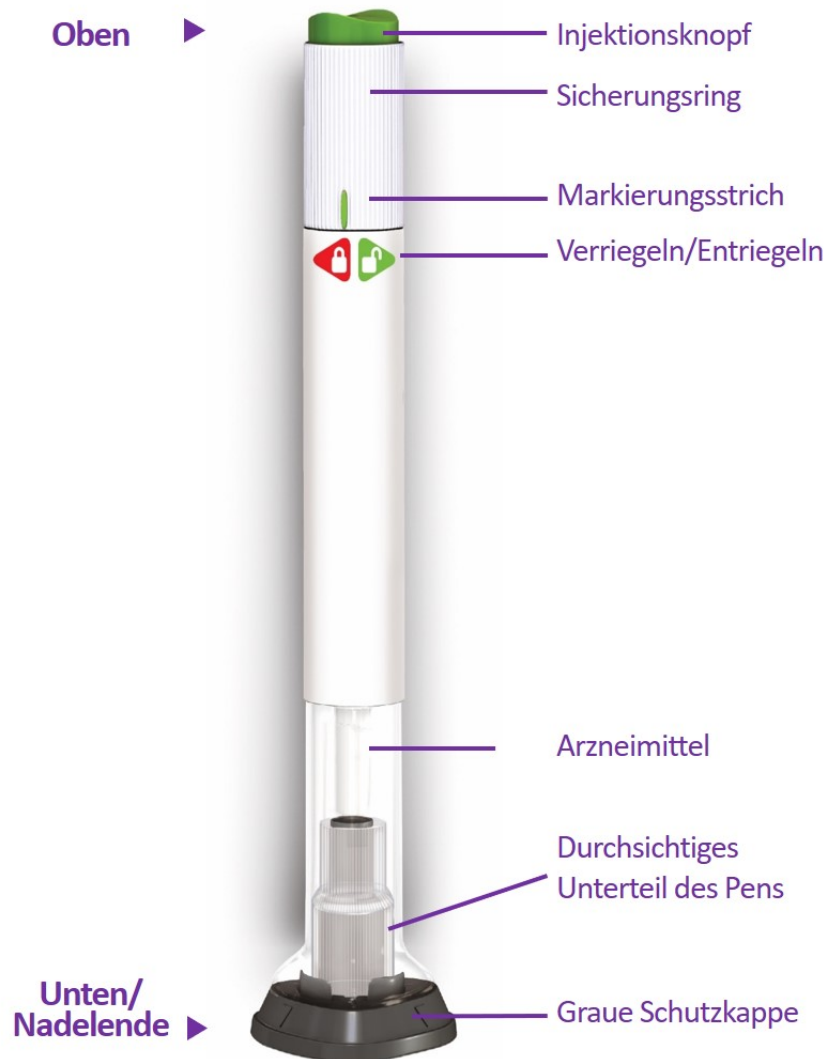


## 1 KAPPE ABZIEHEN

- Überprüfen Sie, dass der Pen **verriegelt** ist.
- Ziehen Sie die graue Schutzkappe ab.

**Setzen Sie die Schutzkappe nicht wieder auf. Das könnte die Nadel beschädigen. Berühren Sie nicht die Nadel.**

- Nach dem Abziehen sollte die graue Schutzkappe wie auf der Abbildung aussehen und kann dann entsorgt werden.

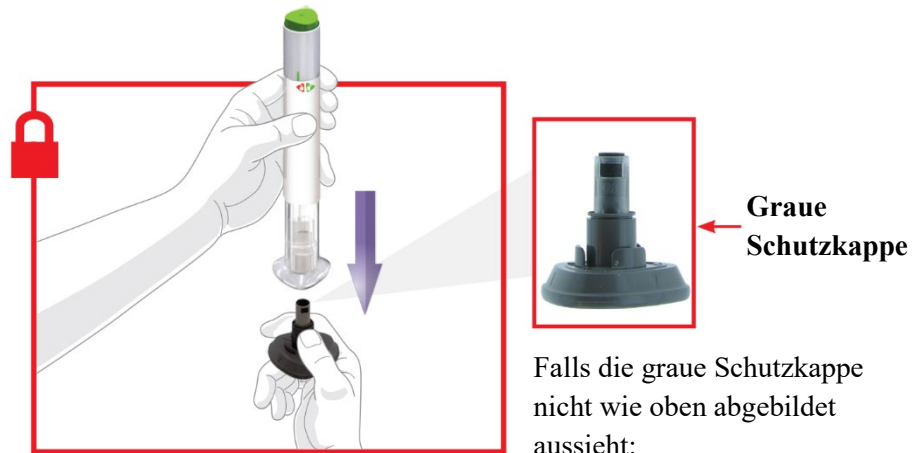

- Verwenden Sie den Pen **NICHT**.
- Verwahren Sie den Pen und die Schutzkappe sicher und kontaktieren Sie Lilly.
- Verwenden Sie einen neuen Pen.

## 2 AUFSETZEN UND ENTRIEGELN

- Setzen Sie das durchsichtige Unterteil des Pens an der Injektionsstelle flach und fest auf Ihre Haut auf.

- **Entriegeln** Sie den Pen durch Drehen des Sicherungsrings.



### 3 DRÜCKEN UND HALTEN

- Drücken und halten Sie den grünen Injektionsknopf; Sie werden ein lautes Klicken hören.



- Drücken Sie das durchsichtige Unterteil des Pens weiter fest gegen Ihre Haut, bis Sie ein zweites Klicken hören. Dies passiert nach etwa 5-10 Sekunden, wenn die Nadel sich zurückzieht.
- Nehmen Sie den Pen von der Injektionsstelle.



- **Wenn der graue Bereich sichtbar ist, wissen Sie, dass Ihre Injektion vollständig abgeschlossen ist.**

## WICHTIGE INFORMATIONEN

Lagerung und Handhabung  
Entsorgen des Pens  
Häufig gestellte Fragen  
Weitere Informationen  
Wo kann ich mehr erfahren

## LAGERUNG UND HANDHABUNG

- Der Pen enthält Glasteile. Behandeln Sie ihn vorsichtig. Sollte der Pen auf einen harten Boden fallen, verwenden Sie ihn nicht. Benutzen Sie dann einen neuen Pen für Ihre Injektion.
- Bewahren Sie Ihren Pen im Kühlschrank auf.
- Wenn eine Kühlung nicht möglich ist, können Sie Ihren Pen bis zu 14 Tagen bei Raumtemperatur (unter 30 °C) aufbewahren.
- Frieren Sie Ihren Pen nicht ein. Wenn der Pen eingefroren war, **BENUTZEN SIE IHN NICHT**.
- Bewahren Sie den Pen in der Originalverpackung auf, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
- Bewahren Sie den Pen für Kinder unzugänglich auf.
- Die vollständige Information zur korrekten Aufbewahrung entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation.

## ENTSORGEN DES PENS

- Entsorgen Sie den Pen in einem durchstechsicheren Behältnis oder wie von Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal empfohlen.
- Entsorgen Sie das gefüllte durchstechsichere Behältnis.
- Fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal, wie Sie Arzneimittel entsorgen, die Sie nicht länger benötigen.



## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

### Was mache ich, wenn ich eine Luftblase in meinem Pen entdecke?

Luftblasen sind normal. Sie sind harmlos und beeinträchtigen nicht Ihre Dosis.

### Was mache ich, wenn ich den Pen entriegelt und den grünen Injektionsknopf gedrückt habe, bevor ich die Schutzkappe abgenommen habe?

Nehmen Sie die Schutzkappe nicht ab, und verwenden Sie diesen Pen nicht. Entsorgen Sie den Pen entsprechend der Anweisung Ihres Arzts, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals. Spritzen Sie Ihre Dosis mit einem neuen Pen.

**Was mache ich, wenn sich ein Tropfen Flüssigkeit an der Nadelspitze befindet, nachdem ich die Schutzkappe entfernt habe?**

Ein Tropfen Flüssigkeit an der Nadelspitze ist nicht ungewöhnlich und wird Ihre Dosis nicht beeinflussen.

**Muss ich den Injektionsknopf gedrückt halten, bis die Injektion vollständig beendet ist?**

Das ist nicht notwendig, aber es kann Ihnen helfen, den Pen ruhig und fest an Ihre Haut zu drücken.

**Ich habe es mehr als zweimal während meiner Injektion klicken gehört – zwei lautere Klicks und einen leiseren. Habe ich meine Injektion vollständig erhalten?**

Einige Patienten hören ein leises Klicken direkt vor dem zweiten lauten Klick. Das entspricht der normalen Funktionsweise des Pens. Drücken Sie den Pen weiter auf die Haut, bis Sie das zweite lautere Klicken hören.

**Was mache ich, wenn sich nach der Injektion ein Tropfen Flüssigkeit oder Blut auf meiner Haut befindet?**

Das ist nicht ungewöhnlich und wird Ihre Dosis nicht beeinträchtigen.

**Ich bin nicht sicher, ob mein Pen richtig funktioniert.**

Überprüfen Sie, ob Sie Ihre Dosis erhalten haben. Ihre Dosis wurde korrekt abgegeben, wenn der graue Bereich zu sehen ist (siehe Schritt 3). Für weitere Hinweise kontaktieren Sie auch Ihre örtliche Lilly Filiale, die in der Gebrauchsanweisung zu finden ist. Bis dahin bewahren Sie Ihren Pen an einem sicheren Ort auf, um versehentliche Verletzungen durch die Nadel zu vermeiden.

**WEITERE INFORMATIONEN**

- Wenn Sie schlecht sehen, verwenden Sie Ihren Pen NICHT ohne die Hilfe einer Person, die in der Anwendung des Trulicity-Pens geschult wurde.

**WO KANN ICH MEHR ERFAHREN**

- Wenn Sie weitere Fragen oder Probleme bezüglich Ihres Trulicity Pens haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal.



**SCANNEN SIE DIESEN CODE, UM FOLGENDE INTERNET-SEITE  
AUFZURUFEN:  
[www.trulicity.eu](http://www.trulicity.eu)**

**Zuletzt überarbeitet im Juni 2021**